




STEP BY STEP

DIAGNOSE

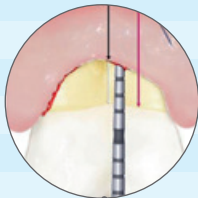

Entzündung

ST $\geq$ 5 mm oder
ST $\geq$ 4 mm & BOP+

CLEAN



VORBEREITUNG PERISOLV®

Mischen der beiden Komponenten




PERISOLV® muss über einen längeren Zeitraum gekühlt ($<8^{\circ}\text{C}$) gelagert werden.



APPLIKATION PERISOLV®

Reinigungsgel in den Defekt applizieren.

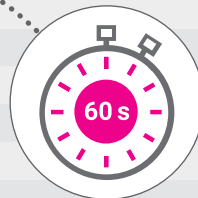

EINWIRKZEIT PERISOLV®

Lassen Sie PERISOLV® 60 Sekunden oder länger einwirken.

WIEDERHOLUNG

Erfahrungsgemäß sind bei Zähnen ca. 2 (min.)-3 Zyklen und an Implantaten ca. 5-7 notwendig.

Noch verunreinigt!



MECHANISCHE INSTRUMENTIERUNG

Beginnen Sie mit der gründlichen Instrumentierung der Tasche und der Zahnwurzel- bzw. Implantatoberfläche zur Entfernung von Biofilm und Granulationsgewebe.



SPÜLEN/SICHTKONTROLLE

Bitte spülen Sie die Tasche mit steriler physiologischer Kochsalzlösung aus und prüfen Sie, ob bei der Instrumentierung noch sichtbare Konkrement/Biofilmreste/Entzündungsgewebe aus der Tasche austreten.



SRP mit Küretten vor der NaCl-Spülung hilft bei der Beurteilung der Taschenreinheit.

Keine Reste!

CLEAN



SEAL

VORBEREITUNG xHyA (vernetzte Hyaluronsäure)

Sie benötigen eine Karpulenspritze
(stumpfe Applikationskanüle G21- G27).



VERSIEGELUNG

Füllen Sie die Tasche von apikal
nach koronal mit xHyA-Gel auf.



NACHSORGE

PATIENTENANWEISUNG PARODONTITIS

- 2 Stunden nicht essen & trinken
- 24 Stunden keine Spülung mit CHX-haltigen Präparaten
- Erst am Abend des Behandlungstages mit dem Zähneputzen beginnen



PATIENTENANWEISUNG PERIIMPLANTITIS


- 2 Stunden nicht essen & trinken
- 24 Stunden keine Spülung mit CHX-haltigen Präparaten
- 24h keine Zahnreinigung
- mindestens 2 Tage keine Interdentalbürsten benutzen



FOLLOW-UP

KONTROLLTERMINE

- Nachkontrollen führen Sie nach eigenem Ermessen durch
- Planen Sie Besuche im Abstand von 3-12 Monaten ein
- Klinische Parameter prüfen (ab dem 3-Monatskontrolltermin)

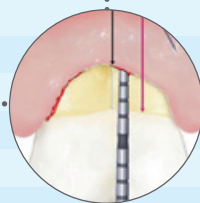

Noch
entzündet!

STEPBYSTEP-VIDEO
PARODONTITIS



STEPBYSTEP-VIDEO
PERIIMPLANTITIS