

EVIDENZ


KLINISCHE EVIDENZ

Sinuslift mit OSOPIA




PRÄ-OP

Atrophierter Sinus im zweiten Quadranten mit unzureichender Restknochenhöhe in Regio 25.

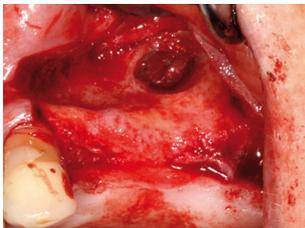

OP

Präparation eines Sinusfensters in Regio 25 (links). Augmentation mit OSOPIA. Die optimale Graft-Morphologie erleichtert die Applikation des Materials (rechts).

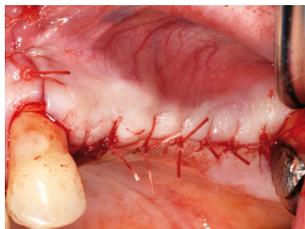


Zustand nach Auffüllen der Sinuskavität mit OSOPIA (links). Spannungsfreier Wundverschluß (rechts).



6 MONATE POST-OP

Optimaler Erhalt und deutliche Knochenkonsolidierung im zuvor augmentierten Sinusbereich 25 (links). Gewinnung von Knochenbiopsie mittels Trepanbohrer in Regio 25 vor Implantatinsertion (rechts).

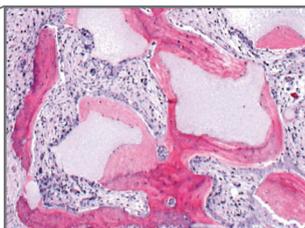

Die Knochenbiopsie zeigt guten Graft-Knochen-Kontakt (links). Histologische Auswertung belegt optimale Knochenintegration der Graft-Restpartikel in neu gebildetem vitalem Knochen (Mitte, rechts).

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Jan Willem Hoekstra, Nijmegen, NL.