



# EVIDENZ

## KLINISCHE EVIDENZ


Augmentation von atrophierte Extraktionsalveole mit absichtlich exponierter OSSIX® Plus Membran

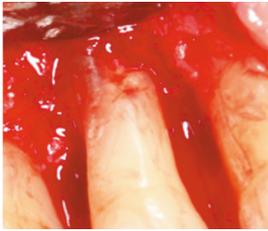


OP  
Nicht erhaltungswürdiger Zahn 14 mit beträchtlicher Knochenresorption.

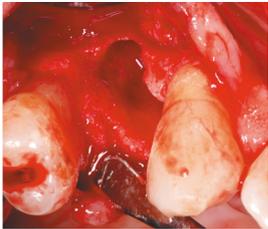


Defekt nach Zahnextraktion, bukkale Knochenlamelle vollständig resorbiert.

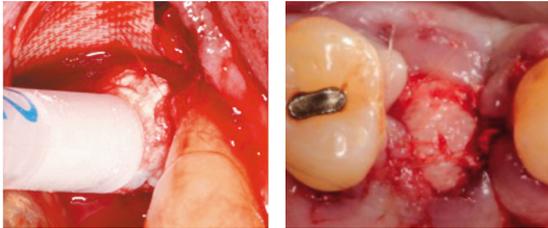

Augmentation mit schnell resorbierbarem Calciumsulfat 3D Bond™. Abdeckung mit OSSIX® Plus Membran bukkal (li) und crestal (re). Der Lappen wurde repositioniert und mit Nähten ohne Entlastung fixiert, die OSSIX® Plus Membran wurde absichtlich exponiert belassen.

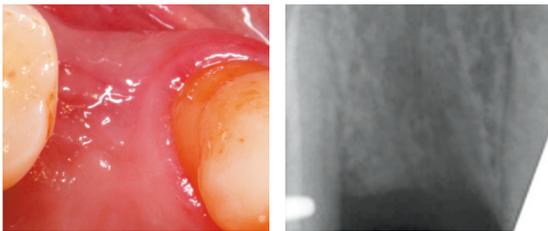

3 Monate post-OP  
Vollständiger Wundverschluss (li).  
Gesunde Weichgewebesituation ohne Anzeichen eines Volumenverlusts (re).

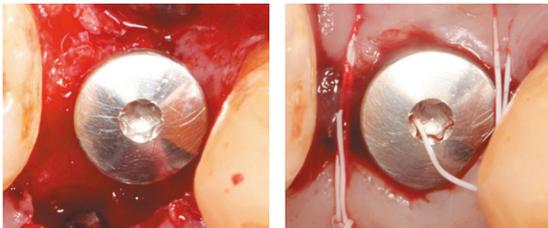

Zustand bei Wiedereröffnung zeigt vollständige Integration des Augmentats in ausreichend vitalem Knochen, guter Erhalt des Alveolarkamms ermöglicht Implantation in korrekter Position.



Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Anton Friedmann, Deutschland