

EVIDENZ


KLINISCHE EVIDENZ

Behandlung von Periimplant-Mukositis mit CLEAN & SEAL™




Prä-OP

Periimplantäre Mukositis gekennzeichnet durch 5 mm Sondierungstiefe mit positivem Blutungsindex (BoP+).

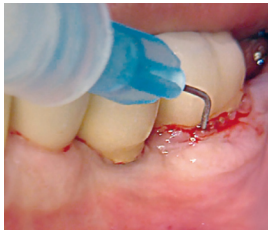

OP

Nach supragingivaler Entfernung des Biofilms wird PERISOLV® appliziert (li). Mechanische Entfernung des Biofilms (Edelstahlküretten & Ultraschallinstrumente, re). Die Auftragung von PERISOLV® und die mechanische Reinigung sollten 1-2mal wiederholt werden.

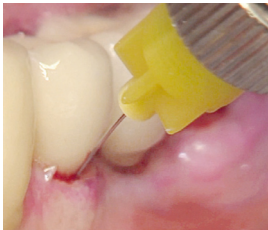

Nach Abschluß des nicht-chirurgischen periimplantären Debridements wird zur Versiegelung der Tasche und zur Förderung des Heilungsprozesses Hyaluronsäure (hyaDENT BG) in die Tasche appliziert.



30 Tage post-OP

Der Heilungsprozess wird durch die Anwesenheit von Hyaluronsäure unterstützt.



1 Jahr post-OP

Die Sondierungswerte liegen im Normbereich ohne Blutung. Die periimplantäre Mukositis wurde erfolgreich behoben.



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Roberto Abundo, Italien.